


## WUNDFLÄCHENMESSUNG MIT QR-CODE

---

### So geht's

Du benötigst den QR-Code für die Wundflächenmessung mit der eb:fly App. Drucke den QR-Code in diesem Dokument aus, um dann in 2 Schritten deine Wundfläche zu messen. So geht's:

**Drucke Seite 2** dieses Dokuments aus. Achte in den Druckeinstellungen darauf, dass das Dokument in **Originalgröße (Skalierung: 100%)** ausgedruckt wird, um den QR-Code im **Format 4cm x 4cm** ausgedruckt zu erhalten. Bitte die Größe unbedingt überprüfen, sie ist Voraussetzung für die erfolgreiche Wundflächenmessung. Es ist nur ein QR-Code für die Messung erforderlich, und Du kannst den gleichen QR-Code beliebig häufig verwenden.

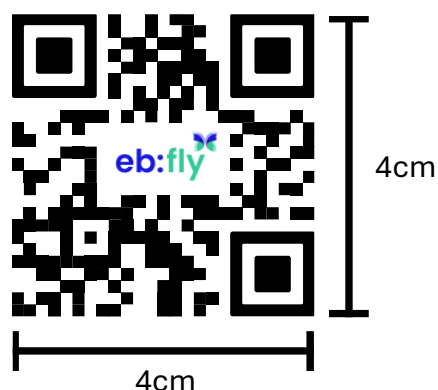

**Du hast keinen Drucker zur Verfügung oder möchtest den QR-Code lieber als zugeschnittenen, abwischbaren Sticker?**

Dann schreibe uns ein E-Mail an [services@eb-fly.com](mailto:services@eb-fly.com) und wir senden Dir den QR-Code einen **A5-Bogen mit Stickern per Post**. Hierfür benötigen wir einige Angaben von Dir. Wir verwenden diese ausschließlich für den Versand und behandeln sie vertraulich. Bitte sende uns nicht Deine eb:fly ID. Für dein Email an uns kannst du einfach den folgenden Text kopieren und mit deinen Angaben ergänzen:

Bitte senden Sie mir den eb:fly QR-Code als Sticker zu. Durch meine persönlichen Angaben bestätige ich, EB-Betroffener bzw. Angehöriger zu sein und die eb:fly App zu nutzen.

Name (bitte mindestens Nachname für Postversand):

Versandanschrift (Straße, PLZ Stadt):

**Du hast den QR-Code und deine eb:fly App?**

Dann kannst du jetzt in zwei einfachen Schritte die **Wundflächenmessung durchführen**.

**Schritt 1:** Wähle die Funktion „**Wundfläche messen**“ und fotografiere die Wunde gemeinsam **mit dem QR-Code**. Dabei ist wichtig: Wunde und QR-Code vollständig und möglichst im gleichen Winkel (senkrecht über bzw. frontal vor Wunde) fotografieren; der QR-Code darf die Wunde nicht verdecken und sollte die gleiche Entfernung zur deiner Kamera haben (nicht weiter vorne oder hinten). Die eb:fly App gibt Dir eine Rückmeldung, ob der QR-Code im Bild erkannt wurde. Falls nicht: Probiere es direkt nochmal. Nach einigen Versuchen wird es Dir einfach gelingen.

**Schritt 2:** Anschließend den **Wundrand im Bild mit deinem Finger nachzeichnen** und die Wundflächenmessung übernehmen. Bild und Wundfläche sind nun gespeichert. Die Schritte sind auch in der Gebrauchsanweisung detailliert beschrieben.

## SEITE 2: QR-CODE ZUM AUSDRUCKEN

Bitte in Originalgröße drucken (100% Skalierung). Prüfe die Größe des QR-Code im Ausdruck (4cm x 4cm). Übe in der eb:fly App, indem du den nachstehenden QR-Code und das Rechteck ausdruckst. Markiere das Rechteck und vergleiche die berechneten Werte.

